

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment fonctionne l'iPad avec des contacteurs (via switch2scan)



Description :

Le Switch2scan est un petit boîtier Bluetooth sur lequel on peut relier jusqu'à 4 contacteurs. Ainsi en lançant la fonction VoiceOver de l'appareil, celui-ci interprétera les contacts en information permettant la navigation.

Comment faire fonctionner le Switch2scan ? :

Pour commencer, activez le Bluetooth sur votre plage tactile.


Réglages / Bluetooth

Lorsque vous apercevrez Le Switch2scan Prétorian, attendez qu'il soit écrit à côté « Connecté », et revenez sur l'écran principal à l'aide de la touche « Accueil ».

Activez ensuite VoiceOver.

Réglage/Général/Accessibilité/VoiceOver

Vous pouvez désactiver l'énonciation en restant appuyer 2 secondes sur la touche « mode » du Switch2scan.

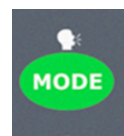

Formules et utilisation :

Configuration	Contacteur 1	Contacteur 2	Contacteur 3	Contacteur 4
En solo	Brève pression = sélection Presser et rester = 1s – auto-scan aller/retour Presser et rester = 2s - accueil			
2 unités	Auto-scan aller/retour	Brève pression = sélection Presser et rester = 2s - accueil		
3 unités	Auto-scan aller/retour	Sélectionner	Accueil	
4 unités	Scan manuel aller	Scan manuel retour	Sélectionner	Accueil
Avec iBooks	Brève pression = Scan manuel aller Presser et rester = 1s – tourne page suivante	Brève pression = Scan manuel retour Presser et rester = 1s – tourne page précédente	Sélectionner	Accueil

Exemple 1

Avec un contacteur branché dans l'entrée 1 du Prétorian, je sélectionne le mode 1 sur celui-ci. Ensuite, je maintiens enfoncé le contacteur quelques secondes, pour lancer le balayage. Si je veux revenir en arrière, je maintiens enfoncé le contacteur quelques secondes à nouveau. Pour sélectionner l'application choisie, je clique sur le contacteur une fois que le balayage arrive au-dessus d'elle. Une fois entré dans l'application, le balayage reprend. Pour revenir sur la page d'accueil, effectuer « Echappe » en maintenant enfoncé le contacteur plusieurs secondes.

Exemple 2

Avec quatre contacteurs branchés dans le Prétorian, je sélectionne le mode 4 sur celui-ci. Le contacteur branché dans l'entrée 1 du Pretorian correspond à « suivant » et me permet d'aller d'application en application. Le contacteur branché dans l'entrée 2 correspond lui à « précédent », il fait la même chose que le contacteur 1, mais dans l'autre sens. Le contacteur branché dans l'entrée 3 correspond à « Sélectionner » ou « Enter » et confirme donc votre choix une fois que vous appuyez dessus. Le contacteur branché dans l'entrée 4 correspond quant à lui à « Echappe » et vous permet de sortir de l'application.

Astuces : Si vous ou un de vos proches, avez besoin à un moment donné du clavier virtuel de votre appareil sur une application qui le nécessite, appuyez quelques secondes sur la touche « Quick Acces » qui se trouve sur la face avant du Pretorian. La touche Speed vous permet quant à elle d'accélérer à la vitesse en mode balayage.

